



# CABLE ECG MONOBLOQ 3 DERIVACIONES TERMINA PINZA

# SILUJ

Cable COP660I3C12P ECG para monitor Philips  
3 Pinzas y conector macho 12 Pin

- Este modelo de cable se utiliza en monitores ECG Philips
  - 78352C
  - 78354C
  - 78834C
  - M1001A/B
  - M1002A/B
  - M1722A/B
  - M1723A/B
  - M2475B
  - MP50
- En un lado dispone de un conector mono bloque de 12 pin macho, en el otro extremo dispone de 3 pinzas

Referencia COP660I3C12P

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad

Color: Cable gris, Spliter monobloq gris, pinzas 3 colores

Polos / Pines: Conector para monitor 12 Pin macho

Marca: MedicalCables

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Compuesto por**

- Conector circular de 12 pin macho
- Monobloq 1 entrada con 3 salidas
- 3 pinzas (Roja, Verde, Amarilla)

- **Observaciones**

- Es importante seguir el orden establecido por los terminales del conector en el dispositivo, para no interferir con el sistema de visualización.
- Para desenchufar el cable tire del conector no del cable.
- Antes de cada uso debe ser comprobado que el cable sea el que corresponde al dispositivo que se va a utilizar y este funciona.
- **Limpieza:** Se puede limpiar con agua tibia y jabón o un limpiador neutro.
- **Desinfección:** Se recomienda desinfectantes químicos tales como etanol (70%-80%, propanol (70%-80%, aldehídos (2%-4%).
- **Atención:** No sumergir los cables y/o conectores en líquidos.
- **Proteger** los cables de fuentes de radiación UV.
- **Comprobar** siempre que el conector este limpio, en perfecto estado y no este dañado.

