

BATERIA MEDICA WELCH ALLYN 72300 COMP.



SILUJ

Bateria compatible WELCH ALLYN y Cardial Medical 3.6V 750MAh 2.7Wh

- Este modelo de batería es compatible con los siguientes equipos
 - WELCH ALLYN 71000C
 - WELCH ALLYN 71020A
 - WELCH ALLYN 71000A
 - WELCH ALLYN 71020C
 - WELCH ALLYN 71055C
 - WELCH ALLYN 72300
 - CARDIAL MEDICAL CJB-723
 - Otros equipos N MNC723W y N MNC723
- La pieza original Welch Allyn para la que es compatible tiene el código 78904587

Referencia 002-WB723MD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 750 mAh / 2,7 Wh
Voltaje / Tensión: 3,6V
Tamaño: 71,21 x 25,40 x 25,40 mm
Tecnología: NI-CD (Níquel-Cadmio)
Rango Capacidad: De 0,1Ah a 4,99Ah
Marca: WELCH ALLYN Compatible

Este folleto Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
previa de SILUJ Illumination S.L.



• **Características**

- Código: CS-WB7323MD
- Tecnología: Ni-CD
- Capacidad: 750 mAh / 2,7 Wh
- Tensión: 3,6V
- Medidas: 71,21 x 25,40 x 25,40 mm
- Código EAN: 4894128073383

• **Instrucciones de operación**

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad óptima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchufela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

• **Advertencia**

- No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

• **Precaución**

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
- Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

• **Consejo del staff de Siluj:** Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.



